

この度は「猫の泌尿器モデル」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご利用の前に、必ず本書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

●製品について

品名	猫の泌尿器モデル
品番	オス猫：810000002 / メス猫：810000003
製品タイプ	正常モデル
サイズ	オス猫：縦 約 160mm X 横 約 46mm X 高さ 約 68mm メス猫：縦 約 126mm X 横 約 40mm X 高さ 約 45mm
素材	軟質ポリウレタン（透明タイプ）

●免責事項

当社の製品は全てハンドメイドの為、製品によっては一部に下記事項が見られる場合がございます。あらかじめご了承ください。

- ・ 製品ごとに色調及び硬度に若干の誤差が生じます。
- ・ 泌尿器モデルの内腔に残留物がある場合がございます。製造過程で発生した残留物で製品性能への影響はございません。
- ・ 製品表面に成形型のつなぎ目による段差及び樹脂流入口痕が残ります。
- ・ お客様側の原因で発生した損失や損害については一切責任を負いません。
- ・ 樹脂の特性上、可塑剤が染みでて、粘着性がでる場合がございます。
そのため製品全体にウレタンコーティング剤を塗布しております。

●取扱上の注意

- ・ 粘着性の性質があるため、接触した箇所の塗装などを剥がす恐れがございます。
- ・ 表面のウレタンコーティングが剥がれて粘着感がでてきた場合、性能や品質上問題ありません。予めご了承ください。
- ・ 強い力を加えると裂ける恐れがあります。
- ・ 直射日光や殺菌灯の紫外線が当たる場所や高温多湿な場所を避けて保管してください。
熱や紫外線などにより溶解・黄変・変色する場合がありますのでご注意ください。
- ・ 泌尿器モデルを水中あるいは水を入れた状態で2時間以上経過すると、樹脂の白濁や含水して膨潤する可能性があります。万一、本製品に白濁や膨潤が発生した場合、モデルを十分乾燥させた後、再度使用して下さい。例えば、1%（W/W）以上の濃度のグリセリンを水溶液に添加することで、白濁や膨潤を軽減させることができます。
- ・ 色素で色付けした水溶液をモデルに入れる場合、樹脂に色素沈着が生じることがありますのでご注意ください。
- ・ 本製品はより精密なトレーニングモデルを目指して製造しておりますが、直接診断用で

はなく実際の処置で同様の効果を保証するものではございません。

- 本製品は改良のため、予告無しに仕様変更する場合がございます。予めご了承下さい。
製品に関するお問い合わせは、「製造販売元」までご連絡下さい。