

ウロシステム

Q 採尿バッグを設置するときの注意点を教えてください。

A 採尿バッグを膀胱より高い位置に上げると、尿が逆流する恐れがございます。採尿バッグの位置は、常に膀胱より低い位置に固定してください。

Q ベッドがないのですが、どのように設置したら良いですか？

A 耐久性や衛生上の観点から、尿バッグは吊るしてご使用いただくことを推奨しております。やむを得ず床置きされる場合には、尿バッグをビニール袋等で覆い、床にタオルを敷くなどしてご使用ください。また、布団でご使用になる場合は、敷布団を2枚重ねるなどして、常に尿バッグが膀胱より低い位置になるように設置をお願いします。

Q 移動の時、採尿バッグを横置きできますか？

A 採尿バッグに付いている通気性を有するフィルターにより、インレットチューブ内が陰圧になるのを防ぎ、尿がバッグに落ちる設計となっています。尿が入ったまま採尿バッグを寝かせ置きにすることでフィルターが濡れ、通気性が損なわれます。やむを得ず寝かせ置きする場合は、採尿バッグ内の尿を全て廃棄し、フィルターが濡れないようにご注意ください。

Q お風呂に入れますか？

A 尿が逆流するリスクを考慮して、シャワー浴をお勧めします。

Q ウロシステムのカテーテルと採尿バッグの接続は外すことができますか？

A 接続部はフィルムを被せておりますので、ミシン目をはがし外すことは可能です。しかし、感染リスクを高めることになるため、お勧めいたしません。

Q どうやったら購入できますか？

A 医師の処方箋が必要となります。医療機関へお問い合わせください。

Q バルーンはどうして割れるのですか？

A シリコン製品は、粘膜への刺激が少なく内腔が広く確保できることから尿の流出が良いなどの利点がある一方、傷等が生じた場合に著しく強度が低下し、傷を発端とし裂けやすい特性があります。尿石灰分の多い患者に使用した場合、バルーン表面への石灰分付着により破裂する恐れがあります。