

医04 整形用品

一般医療機器 コットンボール 11028000

フィルターボール アルファ (未滅菌)

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・ 再使用禁止
- ・ 体内に留置しないこと

【形状・構造及び原理等】

■ 形状

本品は、脱脂した綿繊維を丸めた物に、カルメロー
スナトリウム水溶液を噴霧、適当な長さに裁断した
ものである。

* ■ 材質

セルロース

* ■ 原理

セルロースの親水性及び中空構造により吸水性を
有し、液体の吸収を行う。

【使用目的又は効果】

様々な身体部位に薬物を塗布するため、又は液を除
去するために用いる綿繊維の球状の塊。

**【使用方法等】

- ・ 滅菌して、血液・体液の吸収又は薬剤の塗布等に
適宜使用する。
- ・ 滅菌は、エチレンオキサイドガス滅菌、電子線滅
菌、ガンマ線滅菌を行う。
- ・ 糊剤の一部が変色する可能性があるが、品質、安全
性に問題はない。

【使用上の注意】

- ・ 包装に破損、水濡れ等、異常がみられる場合は、
使用しないこと。
- ・ 開封後は早めに使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場
所を避けて保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社エフスリー

愛知県名古屋市区笠取町3-415

TEL 052-522-5226