

医04 整形用品  
一般医療機器 医療用不織布 34655000

## ファインクロス

### 再使用禁止

---

#### 【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 体内に留置しないこと

#### 【使用上の注意】

使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理すること。

#### 【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

#### 【形状・構造及び原理等】

綿100%の不織布

本品は、白色の繊維状の軟毛で、におい及び味はない

セルロースの親水性及び中空構造により吸水性を有し、液体の吸収を行う。

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

**株式会社エフスリー**

愛知県名古屋市西区笠取町3-415

TEL 052-522-5226

#### 【使用目的又は効果】

創傷又は外科切開部を処置するために用いる不織布からなる被覆・保護材をいう。

#### 【使用方法等】

目的に応じ、滅菌して適宜使用する。

滅菌は高圧蒸気滅菌、EOG滅菌ができる。