

医04 整形用品
一般医療機器 綿状パッド(32572000)

ファインパット

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 体内に留置しないこと

*【使用上の注意】

■重要な基本的注意


- 1.包装が破損、汚損、または水濡れしている場合は使用しないこと。
- 2.使用後破棄する場合には、汚染箇所への接触および汚染物の飛散防止に十分注意すること。

* 3.本品は未滅菌品であるため、必要に応じて適宜滅菌して使用すること。

**【形状・構造及び原理等】

**■形状

脱脂綿と防水紙をガーゼで包んだパッド状製品である。

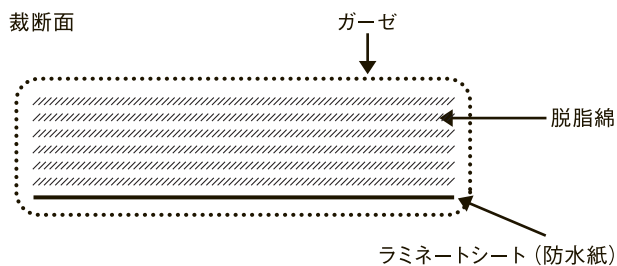

*【保管方法及び有効期間等】

■保管方法

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社エフスリー

愛知県名古屋市西区笠取町3-415

TEL 052-522-5226

*■材質

セルロース

*■原理

セルロースの親水性及び中空構造により吸水性を有し、液体の吸収を行う。

【使用目的又は効果】

神経組織の保護、液の吸収、又は止血のために手術中に用いるコットンまたは合成繊維のパッドをいう。

**【使用方法等】

・使用目的に応じ、適宜使用する。

** ・創傷面には滅菌して使用する。

** ・滅菌は高圧蒸気滅菌、エチレンオキシドガス滅菌ができる。