

医04 整形用品  
一般医療機器 医療ガーゼ 13700000

## トリーゼ

### 再使用禁止

---

#### 【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 体内に留置しないこと

#### 【形状・構造及び原理等】

綿100%のガーゼ。

本品は、白い布で、におい及び味はない。

セルロースの親水性及び中空構造により吸水性を有し、液体の吸収を行う。

#### 【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする主としてガーゼから成る器具をいう。

#### 【使用方法等】

目的に応じ、滅菌して適宜使用する。

滅菌は高圧蒸気滅菌、EOG滅菌ができる。

#### 【使用上の注意】

ほつれた繊維が体内に残らないように使用すること。

使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理すること。

#### 【保管方法及び有効期間等】\*\*

保管方法:水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所をさけて、室温で保管すること。

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

**株式会社エフスリー**

愛知県名古屋市西区笠取町3-415

TEL 052-522-5226