

医04 整形用品
一般医療機器 医療ガーゼ 13700000

Yカットガーゼ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 体内に留置しないこと

【形状・構造及び原理等】

綿100%のガーゼを折りたたんだ後に、切り込みを入れたもの。
本品は、白い布で、におい及び味はない。
セルロースの親水性及び中空構造により吸水性を有し、液体の吸収を行う。

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、
外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする主と
してガーゼから成る器具をいう。

【使用方法等】

目的に応じ、滅菌して適宜使用する。
滅菌は高圧蒸気滅菌、EOG滅菌ができる。

【使用上の注意】

ほつれた繊維が体内に残らないように使用すること。
使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】**

保管方法:水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所をさけて、
室温で保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社エフスリー

愛知県名古屋市西区笠取町3-415

TEL 052-522-5226