



コンファ ラパ TC バッグのご使用手順

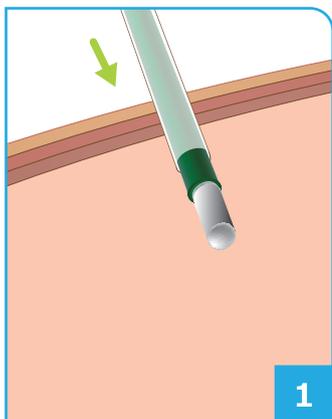


1

本品をトロカールスリーブから挿入し、プランジャーをシャフト奥まで押し込みます。

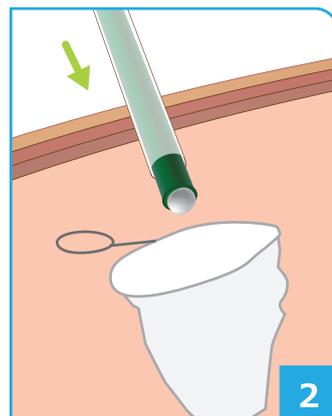


2

パウチが体腔内に挿入されたことを確認し、本体をトロカールスリーブから慎重に抜きます。

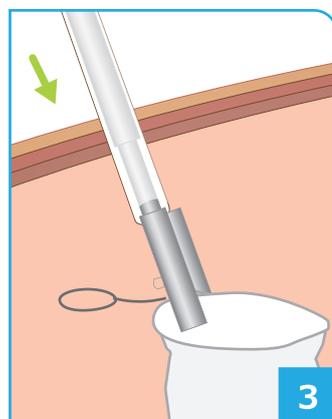


3

パウチは自然に開いたしますが、開ききらない場合は先端形状が鋭利でない器具を使用して開口をしてください。

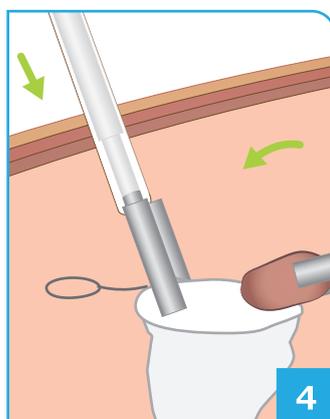

4


パウチ上部を把持し、組織標本等を入れます。組織標本等全体がパウチ内部に納まることを必ず確認してください。

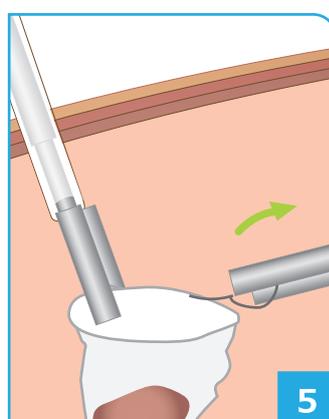

5

クローズループを引っ張り、パウチをしっかり閉じます。



※ 鋭利な器具でパウチに触れると損傷する恐れがあります。

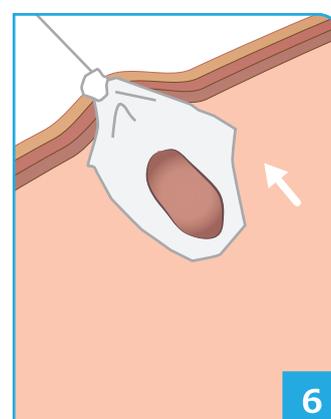

6

トロカールスリーブの先端までパウチを引き出し、パウチとトロカールスリーブと共に、まとめて穿刺部位から抜去します。組織標本等の入ったパウチがそのままの状態では抜去できない時は、トロカールスリーブを穿刺部分から抜去し、パウチが抜去できるように慎重に穿刺部位を拡張してください。

コンファ ラパ TC バッグ (TypeC / ハンドルタイプ)

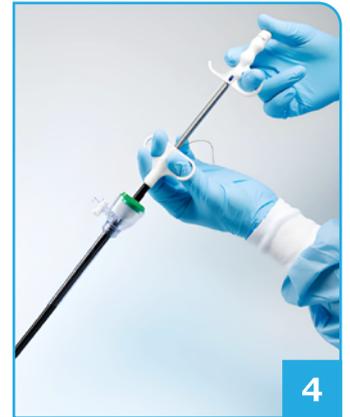
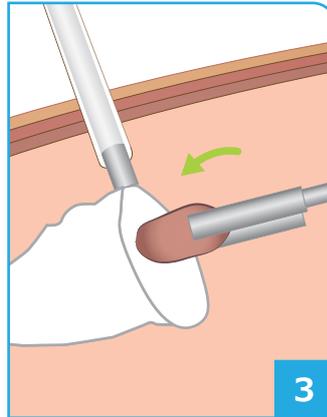


1
本品をトロカールスリーブから挿入します。本品の製品ロゴおよび矢印が上向きになっていることを必ず確認してください。これにより、組織標本等回収の際にパウチが正しい位置に展開されます。

2
本品を把持し、シャフトハンドルに触れるまでプランジャーハンドルを前方に押し、パウチを広げてください。

3
本品のパウチの中に組織標本等を入れます。組織標本等全体がパウチ内部に納まることを必ず確認してください。
※ 鋭利な器具でパウチに触れると損傷する恐れがあります。

4
[抜去方法①]
シャフトハンドルを抑えながらプランジャーハンドルを慎重に引きパウチを閉じます。トロカールスリーブの先端までパウチを引き出し、本体とトロカールスリーブをつかんで、まとめて穿刺部位から抜去します。組織標本等の入ったパウチがそのままの状態では抜去できない時は、パウチが抜去できるように慎重に穿刺部位を拡張します。
※ Oリングは外さないでください。

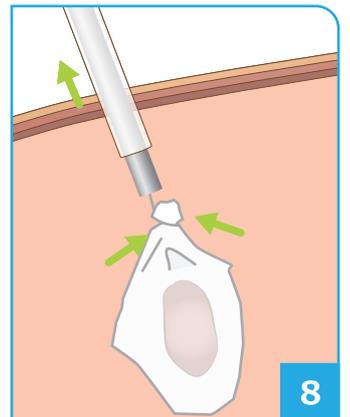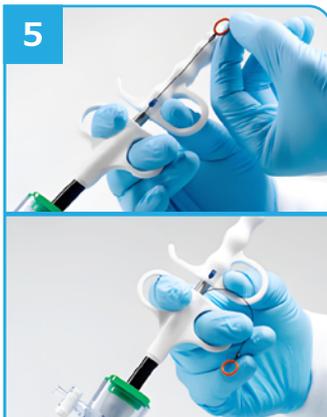


5
[抜去方法②]
組織標本等全体が完全にパウチの中に入ったら、プランジャーハンドル上部に付属するOリングを緩めます。緩めたOリングをシャフト側で把持します。

6
シャフトハンドルを抑えながらプランジャーハンドルを慎重に引きパウチを閉じて体腔内に落とします。

7
プランジャーをシャフトから慎重に引き抜き、Oリングが本体の外側にあることを確認します。
※ シャフト内部にOリングがある場合は、パウチが閉じていない可能性があります。

8
Oリングを引っ張り、パウチをしっかりと閉じます。

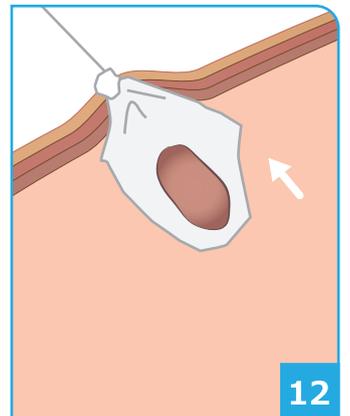

9
トロカールスリーブからシャフトを慎重に引き抜きます。Oリングがトロカールスリーブの外側にあることを確認します。

10
[抜去方法②-I]
トロカールスリーブの先端までパウチを引き出し、パウチとトロカールスリーブと共に、まとめて穿刺部位から抜去します。

11
[抜去方法②-II]
トロカールスリーブを穿刺部分から抜去します。組織標本等の入ったパウチがそのままの状態では抜去できない時は、パウチが抜去できるように慎重に穿刺部位を拡張してください。

12